

Anweisungen für das MYCLIC® Demonstrations-Set für den Enbrel® (Etanercept)-Fertigpen

Informationen nur für das medizinische Fachpersonal.

1. Einführung


Mit dem MYCLIC Demonstrations-Pen werden Enbrel-Injektionen mit dem Fertigpen simuliert – eine tatsächliche Verabreichung der Injektion erfolgt dabei nicht. Mit Hilfe des Demonstrations-Pens kann medizinisches Fachpersonal Patienten in der richtigen Anwendung des Enbrel-Fertigpens schulen. Der Demonstrations-Pen sieht aus und funktioniert ähnlich wie der tatsächliche Enbrel-Fertigpen, verfügt jedoch nicht über eine Spritze, Kanüle oder das Arzneimittel Enbrel. Zudem ist der Demonstrations-Pen wiederverwendbar.

Inhalt des MYCLIC Demonstrations-Kits:

- Ein MYCLIC Demonstrations-Pen mit einer Kappe zum Zurücksetzen

Grüner

Auslöseknopf

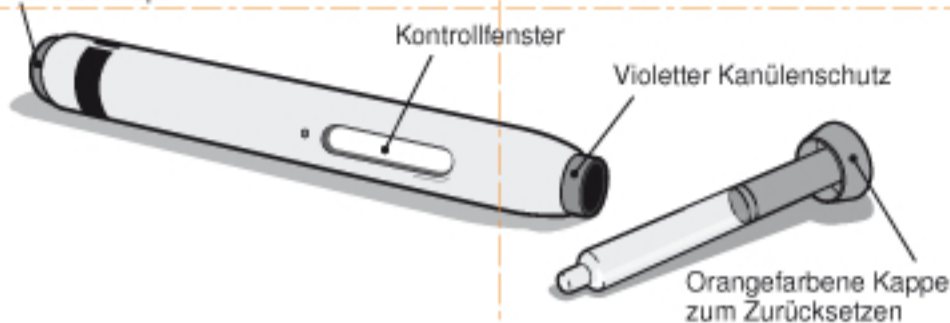

2. Wie ist der Demonstrations-Pen anzuwenden?

Befolgen Sie zur Simulation einer Injektion mit dem Demonstrations-Pen die Anweisungen für einen tatsächlichen Enbrel-Fertigpen. Hinweis: Diese Anweisungen befinden sich in Abschnitt 7 „Gebrauch des MYCLIC Fertigpens zur Injektion von Enbrel“ der Packungsbeilage für die ENBREL 50 mg Injektionslösung im Fertigpen (MYCLIC).

Nach Benutzung sollte der Demonstrations-Pen immer sofort zurückgesetzt werden.

3. Wie wird der MYCLIC Demonstrations-Pen zurückgesetzt?

Schritt 1



- Vergewissern Sie sich, ob der Pen zurückgesetzt werden muss:
 - das Kontrollfenster ist violett;
 - der violette Kanülenschutz befindet sich nicht im Demonstrations-Pen.

Schritt 2



- Stellen Sie die Kappe für das Zurücksetzen fest auf einer ebenen Fläche auf, so wie abgebildet.
- Richten Sie den Pen bündig über der Kappe für das Zurücksetzen aus.

Schritt 3



- Drücken Sie den Pen fest und langsam auf die Kappe für das Zurücksetzen hinunter. Wenn Sie weit genug gedrückt haben, ist ein Klickgeräusch hörbar.

Schritt 4



- Wenn der Pen ordnungsgemäß zurückgesetzt wurde, verbleibt die Kappe vollständig im Inneren des Demonstrations-Pens, so wie abgebildet.

Schritt 5

- Bewahren Sie den Pen mit der eingesetzten Kappe zum Zurücksetzen im zurückgesetzten Zustand auf.

Der Demonstrations-Pen hat eine Nutzungsdauer von ungefähr 200 Anwendungen. Wenn Sie Ersatz benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienstmitarbeiter für Enbrel.

Hinweis: Die tatsächlichen Enbrel-Fertigpens mit der Enbrel 50 mg Lösung sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.

4. Weitere Informationen

Weitere Informationen über Enbrel sind der Packungsbeilage, die mit der Enbrel 50 mg Injektionslösung im Fertigpen (MYCLIC) bereitgestellt wird, zu entnehmen.